

dexcom one

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Laipni lūdzam!

Sākuma ekrāna pārskats

Trauksmes signāli

Ārstēšanas metodes

Sensora sesijas beigšana

Pielikumi



Lietošanas instrukcijas

Satura rādītājs

1. nodaļa	Laipni lūdzam!	3
1.1.	Darba sākšana.	3
2. nodaļa	Dexcom ONE	
	drošības paziņojumi	5
	Lietošanas norādījumi	5
	Lietotājam svarīga informācija	5
	Kontrindikācija	5
	Brīdinājumi	6
	Darba sākšanas drošības paziņojumi.	8
	Sistēmas/aparatūras/programmatūras drošības paziņojumi	8
	Raidītāja drošības paziņojumi	11
	Displeja ierīces drošības paziņojumi	12
3. nodaļa	Sākuma ekrāna pārskats	15
3.1.	Sākuma ekrāna funkcijas	15
3.2.	Sensora mērījums, tendenču bultiņa un grafiks.	16
3.3.	Sākuma ekrāna navigācija un statusa ikonas.	19
3.4.	Agrāku mērījumu skatīšana	19
4. nodaļa	Trauksmes signāli	20
4.1.	Zema un augsta līmeņa trauksmes signāli	21
4.2.	Trauksmes signālu ieslēgšana	22
5. nodaļa	Ārstēšanas metodes	25
5.1.	Kad izmantot mērītāju Dexcom ONE vietā.	25
5.2	Kad novērot un gaidīt.	26
5.3	Kā izmantot tendenču bultiņas.	26
5.4.	Lēmumu par ārstēšanas metodēm pieņemšanas prakse.	27
6. nodaļa	Sensora sesijas beigšana	30
6.1.	Sensora noņemšana	30
6.2.	Atkārtoti izmantojiet savu raidītāju.	31
A pielikums	Traucējummeklēšana	34
A.1.	Precizitāte — sensora mērījumi nesakrīt ar asins glikozes līmeņa mērītāja vērtību	34
A.2.	Precizitāte — sensora mērījumi nesakrīt ar simptomiem.	35
A.3.	Līpošs spilventiņš.	35
A.4.	Lietotne izslēdzas	37
A.5.	Nav dzirdami trauksmes signāli	37
A.6.	Vispārīgi trauksmes signāli.	38
A.7.	Sensora sesijas priekšlaicīga beigšana	42
A.8.	Grafika intervāls.	43
A.9.	Tehniskā atbalsta dienests	43
A.10.	Ūdens un Dexcom ONE	43

B pielikums	Dexcom Clarity	44
C pielikums	Rūpes par Dexcom ONE	45
	C.1. Dexcom ONE apkope	45
	C.2. Glabāšana	45
	C.3. Sistēmas iznīcināšana	45
D pielikums	Iepakojuma simboli	46
E pielikums	Riski un ieguvumi	49
	E.1. Riski	49
	E.2. Ieguvumi	51
F pielikums	Dexcom ONE garantija	53
	F.1. Dexcom sensora ierobežotā garantija	53
	F.2. Dexcom raidītāja ierobežotā garantija	53
G pielikums	Tehniskā informācija	57
	G.1. Ierīces veikspējas raksturojumu kopsavilkums	57
	G.2. Produkta specifikācijas	58
	G.3. Atbilstība radiosakaru noteikumiem	61
H pielikums	Norādījumi profesionālai lietošanai	62
	H.1. Ievads	62
	H.2. Sagatavojiet Dexcom ONE pacientam	62
	H.3. Paskaidrojiet pacientam, kas ir Dexcom ONE un kā tas darbojas	65
	H.4. Iestatiet Dexcom ONE kopā ar pacientu	65
	H.5. Pacienta apsekošana	66
	H.6. Nākamās darbības	66
I pielikums	Vārdnīca	67
Alfabētiskais satura rādītājs		71

1. nodaļa

Laipni lūdzam!

Apsveicam ar Dexcom ONE nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības (CGM) sistēmas (Dexcom ONE) iekļaušanu jūsu dzīvē!

1.1. Darba sākšana

Lai iestatītu Dexcom ONE, izmantojiet norādes instrukcijā **Sākt šeit** vai izpildiet ceļveža darbības, kas ir pieejamas šeit: **dexcom.com**.



Ceļvedis, šī brošūra un Dexcom ONE lietošanas instrukcija sniedz vairāk informācijas par sākuma ekrānu, palīdz pieņemt lēmumus par ārstēšanas metodēm un norāda, kā pabeigt sensora sesiju. Turklāt šī instrukcija arī palīdz ieslēgt trauksmes signālus un personalizēt trauksmes signālu toņus. Šīs instrukcijas attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Jūsu materiāli var izskatīties citādāk.

Kritiski drošības paziņojumi

Dexcom ONE trauksmes signāli

-  Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien tās neieslēdzat
- Iestatīšanas laikā ieslēdziet trauksmes signālus, lai saņemtu glikozes un sistēmas trauksmes signālus, kad sensora uzsildīšana būs pabeigta

Dexcom ONE trauksmes signāli **NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruņa iestatījumus**

- Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa izslēgta), jūs **NEDZIRDĒSIT** augsta vai zema glikozes līmeņa trauksmes signālus
- Trauksmes signāli ir dzirdami TIKAI tad, ja tālrunim ir ieslēgta skaņa
- Pārbaudiet tālruņa iestatījumus, jo pretējā gadījumā varat nepamanīt trauksmes signālu

2. nodaļa

Dexcom ONE

drošības paziņojumi

Lietošanas norādījumi

Dexcom ONE nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības sistēma (Dexcom ONE) ir glikozes līmeņa uzraudzības sistēma, kas paredzēta personām, tostarp grūtniecēm, no 2 gadu vecuma. Dexcom ONE ir izstrādāta, lai aizstātu asins glikozes līmeņa (AGL) noteikšanu ar dūrienu pirkstā, izlemjot par diabēta ārstēšanas metodēm.

Dexcom ONE rezultātu interpretācijas pamatā ir jābūt glikozes tendencēm un vairākiem secīgiem mērījumiem laika gaitā. Dexcom ONE arī palīdz atklāt hiperglikēmijas un hipoglikēmijas epizodes, atvieglojot gan akūtas, gan ilgtermiņa terapijas pielāgošanu.

Dexcom ONE ir paredzēta lietošanai pacientiem mājās un veselības aprūpes iestādēs.

Lietotājam svarīga informācija

Pirms Dexcom ONE lietošanas, lūdzu, pārskatiet produkta instrukcijas. Indikācijas, kontrindikācijas, brīdinājumus, piesardzības pasākumus un citu svarīgu informāciju lietotājam skatiet Dexcom ONE komplektācijā iekļautajās produkta instrukcijās. Ar savu veselības aprūpes speciālistu pārrunājiet, kā izmantot Dexcom ONE attēloto informāciju diabēta labākai pārvaldībai. Produkta instrukcijās ir norādīta svarīga informācija par Dexcom ONE traucējummeklēšanu un sistēmas snieguma raksturlielumiem.

Kontrindikācija

- **Bez MRA/DT/diatermijas — MRA nedroša**



Nelietojiet nevienu Dexcom ONE komponentu magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRA), datortomogrāfijas (DT) skenēšanas vai augstas frekvences elektriska siltuma (diatermijas) procedūras laikā.

Dexcom ONE nav pārbaudīta šādos apstākļos. Magnētiskie lauki un siltums var sabojāt Dexcom ONE komponentus, kas savukārt var izraisīt neprecīzus CGM sensora glikozes mērījumus (Dexcom ONE mērījumus) vai novērst trauksmes signālu atskaņošanu. Bez Dexcom ONE mērījumiem vai trauksmes signālu paziņojumiem var nepamanīt nopietnu zema vai augsta glikozes līmeņa notikumu.

Brīdinājumi

- **Izlasiet lietotājam paredzētos materiālus**

Pirms Dexcom ONE lietošanas rūpīgi izlasiet komplektācijā iekļautos materiālus. Ja tas netiek izdarīts, pastāv iespēja:

- nespēt pareizi izmantot Dexcom ONE;
- neizprast Dexcom ONE informāciju;
- ietekmēt tās darbības līmeni.

- **Neignorējiet zema/augsta glikozes līmeņa simptomus**

Neignorējiet savu pašsajūtu. Ja glikozes trauksmes un Dexcom ONE mērījumi nesakrīt ar jūsu pašsajūtu, izmantojiet asins glikozes līmeņa mērītāju (mērītāju), lai izlemtu par diabēta ārstēšanas metodēm, vai, ja nepieciešams, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Ja rodas šaubas, vienmēr vēl varat izmantot mērītāju.

- **Nav skaitļa, nav bultiņu, nav CGM ārstēšanas metodes**

Ja Dexcom ONE nav redzams skaitlis vai bultiņa vai Dexcom ONE mērījumi neatbilst jūsu simptomiem, izmantojiet mērītāju, lai izlemtu par diabēta ārstēšanas metodēm.

Nav skaitļa, nav bultiņu, nav ārstēšanas metodes. Ja rodas šaubas, vienmēr vēl varat izmantot mērītāju.

- **Nelietojiet, ja...**

Nelietojiet Dexcom ONE, ja jums tiek veikta dialīze vai esat kritiski slims. Nav zināms, kā dažādi apstākļi vai medikamenti, kas ir ierasti šīm populācijām, var ietekmēt sistēmas darbību. Dexcom ONE mērījumi šādās populācijās var būt neprecīzi.

Izpildiet Dexcom ONE norādījumus. Ja tas netiek izdarīts, var rasties nopietns zema vai augsta glikozes līmeņa notikums.

Piesardzības pasākumi

- **Izvairieties no sauļošanās un kukaiņu atvairīšanas līdzekļu lietošanas**

Daži ādas kopšanas līdzekļi, piemēram, sauļošanās un kukaiņu atvairīšanas līdzekļi, var izraisīt Dexcom ONE izmantotās plastmasas plaisāšanu. Pirms Dexcom ONE lietošanas pārlicinieties, vai raidītājam un raidītāja turētājam nav plaisu. Ja atrodat plaisu, lūdzu, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi. Nepieļaujiet šo ādas kopšanas līdzekļu saskari ar Dexcom ONE. Pēc ādas kopšanas līdzekļu lietošanas nomazgājiet rokas, pirms pieskaraties Dexcom ONE. Ja uz Dexcom ONE nokļūst ādas kopšanas līdzekļi, nekavējoties noslaukiet tos ar tīru drānu.

- **Hidroksiurīnvielas piesardzības pasākumi**

Ja lietojat hidroksiurīnvielu, Dexcom ONE mērījumi var būt nepatiesi paaugstināti, un tā rezultātā var netikt parādīti trauksmes signāli par hipoglikēmiju vai rasties diabēta uzraudzības un ārstēšanas metožu kļūmes. Neprecizitātes līmenis ir atkarīgs no hidroksiurīnvielas daudzuma jūsu ķermenī. Izmantojiet savu mērītāju.

- **Iziešana cauri drošības kontrolpunktam**

Ja nēsājat Dexcom ONE, lūdziet veikt manuālu skenēšanu ar rokas ierīci vai visa ķermeņa pārmeklēšanu un vizuālu pārbaudi, nevis ejiet caur uzlabotas attēlveidošanas tehnoloģijas (AIT) ķermeņa skeneri (ko sauc arī par milimetru vilņu skeneri) vai ievietojiet jebkuru Dexcom ONE daļu bagāžas pārbaudes rentgenstaru aparātā.

Dexcom ONE var valkāt caurejamā metāla detektorā. Šādā gadījumā izlemšanai par ārstēšanas metodēm izmantojiet mērītāju, līdz atstājat drošības zonu.

Tā kā mēs neesam pārbaudījuši katru rentgenstaru aparātu un skeneri, tad nezinām, vai tie sabojā Dexcom ONE.

Vai neesat pārliecināts par aparāta veidu? Gādājiet par savas ierīces drošību — pieprasiet manuālu skenēšanu ar rokas ierīci vai visa ķermeņa pārmeklēšanu.

Darba sākšanas drošības paziņojumi

Brīdinājumi

- **Mērītāja izmantošana darba sākšanas laikā**

Sākot darbu ar jaunu sensoru, nesaņemsiet nevienu Dexcom ONE mērījumu vai trauksmes signālu, kamēr nebūs ievadīts sensora kods. Izmantojiet mērītāju, lai izlemtu par ārstēšanas metodēm, sensora 2 stundu uzsilšanas laikā.

Piesardzības pasākumi

- **Pareiza sensora koda izmantošana**

Ieslēdzot jaunu sensoru, displeja ierīcē ir jāievada kods, lai izmantotu Dexcom ONE. Katram sensoram ir savs kods, kas uzdrukāts līpošā spilventiņa aizmugurē. Nelietojiet kodu no cita sensora un neizdomājiet kodu. Ievadot nepareizo kodu, sensors nedarbojas tikpat labi un var būt neprecīzs.

Sistēmas/aparatūras/programmatūras drošības paziņojumi

Brīdinājumi

- **Sensora vads noplīst vai atvienojas**

Neignorējiet sarautus vai atvienojušos sensora vadus. Sensora vads var palikt zem ādas. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi.

Ja sensora vads noplīst zem ādas un nav redzams, nemēģiniet to izņemt. Sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu. Meklējiet arī

profesionālu medicīnisku palīdzību, ja ievades vietā ir infekcijas vai iekaisuma simptomi — apsārtums, pietūkums vai sāpes.


- **Ievades vieta: vēders, augšdelmu aizmugure vai sēžamvieta**

Visi pacienti to var izmantot uz vēdera vai augšdelma aizmugurē. Pacienti 2–17 gadu vecumā var izvēlēties arī sēžamvietas augšpusi. Meklējiet vietu uz vēdera, augšdelmu aizmugurē vai sēžamvietas augšdaļā, kas ir mīkstāka.

Sensors nav pārbaudīts vai apstiprināts lietošanai citās vietās. Konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu par sev vispiemērotāko vietu.

2–17 gadu vecumā: ievadiet vēderā, augšdelma aizmugurē vai sēžamvietas augšdaļā.

Vecumā no 18 gadiem: ievadiet vēderā vai augšdelma aizmugurē.

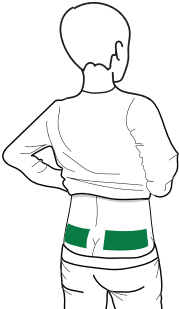2–17 gadi Var ievadīt sēžamvietas augšpusē	Ikviens, kas vecāks par 2 gadiem Var izmantot uz vēdera vai augšdelma aizmugurē
	

- **Glabāšana**

Sensorus var glabāt istabas temperatūrā vai ledusskapī, ja vien temperatūra ir no 2 °C līdz 30 °C. Neglabāiet sensorus saldētavā.

Piesardzības pasākumi

- **Neieslēdziet sensoru pēc derīguma termiņa beigām**

Jaunu sensoru var ieslēgt **derīguma termiņa datumā vai pirms tā**. Tas nodrošina pilnīgu nolietojumu.

Sensora ieslēgšana **pēc** tā derīguma termiņa beigām var izraisīt nepareizus rezultātus.

Derīguma termiņa datums ir norādīts uz sensora iepakojuma etiķetes blakus smilšu pulksteņa simbolam GGGG-MM-DD (gads-mēnesis-diena) formātā.

- **Iepakojuma pārbaude**

Nelietojiet sensoru, ja tā sterilais iepakojums ir bojāts vai atvērts, jo tas var izraisīt infekciju.

- **Tīra un sausa āda**

Notīriet un nosusiniet rokas un ievades vietu pirms sensora ievadīšanas.

Pirms sensora iepakojuma atvēršanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni, neizmantojot gelveida tīrīšanas līdzekļus, un nosusiniet tās. Ievadot sensoru ar netīrām rokām, ievades vietā var iekļūt baktērijas un rasties infekcija.

Notīriet ievades vietu ar spirta salvetēm, tādējādi novēršot infekciju risku. Neievadiet sensoru, kamēr āda nav sausa. Ja ievades vieta nav tīra un pilnīgi sausa, pastāv inficēšanās vai raidītāja turētāja kārtīgas nepielipšanas risks.

Uz ādas nedrīkst būt kukaiņu atvairīšanas līdzeklis, sauļošanās krēms/aizsarglīdzeklis, parfīms vai losjons.

- **Ievades vieta: kas jāpārbauda**

Gādājiet, lai drošības aizsargs būtu savā vietā līdz Dexcom ONE aplikatora uzlikšanai pie ādas. Ja vispirms noņemat drošības aizsargu, varat savainoties, nejauši nospiežot sensora ievadīšanas pogu, pirms esat to paredzējis darīt.

Mainiet ievades vietu līdz ar katru sensoru.

Ja viena vieta tiek lietota pārāk bieži, āda var nesadzīt, radot rētas vai ādas kairinājumu/iekaisumu.

Sensora novietojums ir svarīgs. Izvēlieties vietu:

- Vismaz 8 cm rādiusā no insulīna sūkņa infūzijas komplekta vai injekcijas vietas
- Tālāk no jostasvietas, rētām, tetovējumiem, iekaisušas ādas un kauliem
- Vietā, kas ir mazāk pakļauta sasitumu, saspiešanas vai nogulēšanas miega laikā riskam
- **Pareiza devēja un sensora izmantošana**
Dexcom ONE komponenti nav saderīgi ne ar vienu no iepriekšējiem Dexcom produktiem. Nekombinējiet dažādu paaudžu raidītājus, uztvērējus un sensorus.

Raidītāja drošības paziņojumi

Brīdinājumi

- **Pārbaude**
Neizmantojiet bojātu vai saplaisājušu raidītāju. Bojāts raidītājs var izraisīt traumas elektriskās strāvas trieciena ietekmē un Dexcom ONE nepareizu darbību.
- **Izmantošana kā norādīts**
Raidītājs ir mazs un var izraisīt aizrīšanās apdraudējumu. Nelieciet to mutē un neļaujiet bērniem to turēt bez pieaugušo uzraudzības.

Piesardzības pasākumi

- **Raidītāja atkārtota izmantošana — neizmetiet**
Pabeidzot sesiju, neizmetiet raidītāju. Raidītāju var lietot atkārtoti, līdz Dexcom ONE paziņo, ka raidītāja akumulatoram drīz beigsies derīguma termiņš.
Veselības aprūpes speciālistiem: lūdzu, skatiet tīrīšanas un dezinfekcijas norādes norādījumos profesionālai lietošanai.
- **Neieslēdziet raidītāju pēc derīguma termiņa beigām**
Lai to izmantotu pilnībā, varat ieslēgt jaunu raidītāju **derīguma termiņa datumā vai pirms tā.**

Raidītāja ieslēgšana **pēc** tā derīguma termiņa beigām var izraisīt nepareizus rezultātus.

Derīguma termiņa datums ir norādīts uz raidītāja iepakojuma etiķetes blakus smilšu pulksteņa simbolam GGGG-MM-DD (gads-mēnesis-diena) formātā.

Displeja ierīces drošības paziņojumi

Brīdinājumi

- **Iestatījumu pārbaude**
 - **Papildu trauksmes signāli:** iestatot Dexcom ONE sistēmu, jums tiks prasīts ieslēgt papildu trauksmes signālus. Tie ir jāieslēdz, lai saņemtu glikozes un sistēmas trauksmes signālus. Izpildiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus un drošības brīdinājumus, lai displeja ierīcē saņemtu trauksmes signālus.

Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien tās neieslēdzat. Iestatīšanas laikā ieslēdziet trauksmes signālus, lai saņemtu glikozes un sistēmas trauksmes signālus, kad sensora uzsildīšana būs pabeigta. Dexcom ONE trauksmes signāli **NEPĀRRAKSTĪS** jūsu tālruņa iestatījumus. Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa ir izslēgta), jūs **NEDZIRDĒSIT** augsta vai zema glikozes līmeņa trauksmes signālus. Pārbaudiet tālruņa iestatījumus, jo pretējā gadījumā varat nepamanīt trauksmes signālu.
 - **Viedtālruņa skaļums/skaņa:** pārliecinieties, vai viedtālruņa skaļums ir noregulēts pietiekamā līmenī, skaņa nav izslēgta un darbojas skaļrunis. Ja viedtālrunim būs izslēgta skaņa, iestatīts “Pilnīgs klusums” vai “Netraucēt”, jūs nesaņemsiet Dexcom ONE trauksmes signālus.
 - **Bluetooth:** lietojot *Bluetooth* austiņas, skaļruņus u.c., trauksmes signāli var skanēt displeja ierīcē vai viedtālruņa piederumā. Katrs piederums ir atšķirīgs. Pārbaudiet savus piederumus, lai zinātu, kur tiks atskaņoti trauksmes signāli.

- **Paziņojumi:** pārliecinieties, vai viedtālruna iestatījumi ļauj Dexcom lietotnes paziņojumus rādīt bloķēšanas ekrānā. Tas ļauj redzēt paziņojumus, neatbloķējot tālruni. Dexcom ONE iestatīšanas laikā iespējotiet Dexcom lietotnes paziņojumus, jo pretējā gadījumā nesaņemsiet trauksmes signālus.
- **Akumulators:** gādājiet, lai akumulators vienmēr būtu pietiekami uzlādēts, tādējādi izvairoties no Dexcom ONE datu zuduma.
- **Saderība:** pirms viedtālruna vai tā operētājsistēmas jaunināšanas skatiet saderības informāciju vietnē **dexcom.com/compatibility**. Lietotnes vai tālruna operētājsistēmas automātiskie atjauninājumi var mainīt iestatījumus vai izslēgt lietotni. Vienmēr veiciet manuālu atjaunināšanu un pēc tam pārbaudiet ierīces iestatījumu pareizību.
- **Laiks:** ļaujiet datumam un laikam viedtālrunī automātiski atjaunināties, šķērsojot laika joslas vai pārslēdzoties starp standarta un ziemas/vasaras laiku. Nemainiet viedtālruna laiku manuāli, jo tādējādi tendenču ekrānā redzamais laiks var būt nepareizs un lietotne var pārtraukt datu rādīšanu.

Izpildiet Dexcom ONE norādījumus. Ja tas netiek izdarīts, var rasties nopietns zema vai augsta glikozes līmeņa notikums.

Piesardzības pasākumi

- **Turiet raidītāju tuvu displeja ierīcei**

Turiet raidītāju un displeja ierīci 6 metru rādiusā tā, lai starp tiem nebūtu šķēršļu (piemēram, sienas vai metāla). Pretējā gadījumā tie var nespēt sazināties. Ja starp raidītāju un displeja ierīci ir ūdens, piemēram, ja mazgājaties dušā vai peldat, turiet tos tuvāk vienu otram. Diapazons samazinās, jo *Bluetooth®* ūdenī nedarbojas tik labi.

- **Saņemiet trauksmes signālus savā displeja ierīcē**

Iestatot Dexcom ONE sistēmu, jums tiks prasīts ieslēgt papildu trauksmes signālus. Tie ir

jāieslēdz, lai saņemtu glikozes un sistēmas trauksmes signālus.

Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien tās neieslēdzat. Iestatīšanas laikā ieslēdziet trauksmes signālus, lai saņemtu glikozes un sistēmas trauksmes signālus, kad sensora uzsildīšana būs pabeigta. Dexcom ONE trauksmes signāli **NEPĀRRAKSTĪS** jūsu tālruņa iestatījumus. Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa ir izslēgta), jūs **NEDZIRDĒSIT** augsta vai zema glikozes līmeņa trauksmes signālus. Pārbaudiet tālruņa iestatījumus, jo pretējā gadījumā varat nepamanīt trauksmes signālu.

- **Vai tā ir ieslēgta?**

Ja displeja ierīce būs izslēgta, tajā netiks rādīti Dexcom ONE mērījumi vai trauksmes signāli. Pārliecinieties, vai displeja ierīce ir ieslēgta.

- **Viedtālruņa piederumu pārbaude**

Lietojot viedtālruņa piederumus (piemēram, austiņas vai *Bluetooth* skaļruņus), ņemiet vērā, ka trauksmes signālus var saņemt tikai vienā ierīcē vai piederumā, bet ne visos. Pēc jebkuru viedtālruņu piederumu pievienošanas pārliecinieties, vai viedtālruņa iestatījumi ļauj turpināt saņemt trauksmes signālus.

3. nodaļa

Sākuma ekrāna pārskats


Lielāko daļu laika pavadīsiet sākuma ekrānā. Tas nodrošina Dexcom ONE sensora glikozes mērījumus (mērījumus) un informāciju par tendencēm, kā arī ļauj piekļūt citām Dexcom ONE funkcijām.

Nākamajā sadaļā ir aprakstītas sākuma ekrāna funkcijas. Tālāk ir aprakstīts, kā interpretēt mērījumus, tendenču bultiņas un grafiku, kā arī sniegti norādījumi, kā naviģēt uz citām funkcijām.

3.1. Sākuma ekrāna funkcijas

Tālāk ir sniegts pārskats par Dexcom ONE sākuma ekrāna funkcijām un navigāciju.

Lai skatītu saderīgo viedierīču un operētājsistēmu aktuālo sarakstu, dodieties uz **dexcom.com/compatibility**

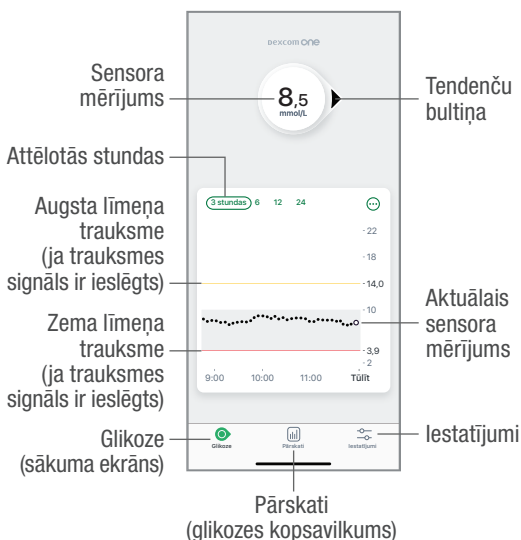

3.2. Sensora mērījums, tendenču bultiņa un grafiks

Kāds ir jūsu pašreizējais mērījums

Redzamais skaitlis ir jūsu mērījums. Tas tiek atjaunināts ik pēc 5 minūtēm.



Visi skaitļi tiek parādīti uz balta fona, ja vien neieslēdzat glikozes trauksmes. Ja:

- **tiek ieslēgta zema līmeņa trauksme**, fona krāsa mainās uz sarkanu, kad tiek sasniegts pārāk zems rādītājs;
- **tiek ieslēgta augsta līmeņa trauksme**, fona krāsa mainās uz dzeltenu, kad tiek sasniegts pārāk augsts rādītājs.

Papildinformāciju skatiet **4. nodaļā** “Trauksmes signāli”.


Kā mainās mērījumi

Lai uzzinātu, kā mainās glikozes līmenis, skatiet tendenču bultiņas.

Tendenču bultiņas	Kā mainās glikozes līmenis
	Stabils Izmaiņas līdz: • 0,06 mmol/L katru minūti • 1,8 mmol/L 30 minūtēs
	Lēnām palielinās vai samazinās Izmaiņas: • 0,06–0,1 mmol/L katru minūti • Līdz 3,4 mmol/L 30 minūtēs
	Palielinās vai samazinās Izmaiņas: • 0,1–0,2 mmol/L katru minūti • Līdz 5 mmol/L 30 minūtēs
	Ātri palielinās vai samazinās Izmaiņas vairāk nekā: • 0,2 mmol/L katru minūti • 5 mmol/L 30 minūtēs
	Nav bultiņas Nevar noteikt tendenci. Izmantojiet AGL mērītāju, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanas metodēm.

Kādi ir bijuši jūsu mērījumi

Baltais rimbulis labajā pusē ir jūsu visjaunākais mērījums. Melnie punkti ir jūsu iepriekšējie mērījumi.

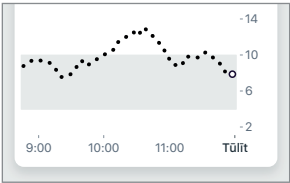

Sākuma ekrāna problēmas

Dažreiz jūs neiegūstat mērījumus vai neredzat skaitli, tikai ziņojumu.

Kas ir redzams	Ko tas nozīmē
	Jūsu mērījums ir zem 2,2 mmol/L
	Jūsu mērījums ir virs 22,2 mmol/L
	Kļūmes ziņojums nozīmē, ka Dexcom ONE nedarbojas un jūs nesaņemsiet trauksmes signālus vai sensora mērījumus. Skatiet A pielikumu “Traucējummeklēšana”.


3.3. Sākuma ekrāna navigācija un statusa ikonas

Izmantojot navigācijas ikonas, varat piekļūt citām funkcijām.

Ikona	Apraksts
	Glikoze: sākuma ekrāns.
	Pārskati: parāda glikozes informāciju par konkrētu periodu, tostarp vidējo glikozes līmeni un vidējo laiku diapazonā.
	Iestatījumi: ļauj rediģēt trauksmes signālus, atrast palīdzību, mainīt iestatījumus, personalizēt skaņas iestatījumus un veikt vēl daudz citu darbību.

3.4. Agrāku mērījumu skatīšana

Lai skatītu grafiku par pēdējām 3, 6, 12 vai 24 stundām, pieskarieties skaitļiem augšpusē.

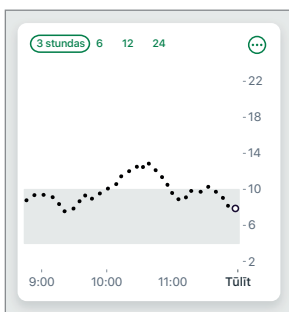

4. nodaļa

Trauksmes signāli

Trauksmes signālu ieslēgšana var palīdzēt uzturēt mērķa diapazonu. Tie ir svarīgs instruments, pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm ar Dexcom ONE. Konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu par vislabākajiem zema un augsta līmeņa trauksmju iestatījumiem.

Ja trauksmes signāli būs ieslēgti, jūs tos dzirdēsiet vai sajūtīsiet to vibrāciju, kad glikozes līmenis būs pārāk augsts vai pārāk zems vai mērījumi īslaicīgi nebūs pieejami.

Kritiski drošības paziņojumi


Dexcom ONE trauksmes signāli

-  Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien tās neieslēdzat
- Iestatīšanas laikā ieslēdziet trauksmes signālus, lai saņemtu glikozes un sistēmas trauksmes signālus, kad sensora uzsildīšana būs pabeigta

Dexcom ONE trauksmes signāli NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruņa iestatījumus

- Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa izslēgta), jūs **NEDZIRDĒSIT** augsta vai zema glikozes līmeņa trauksmes signālus
- Trauksmes signāli ir dzirdami TIKAI tad, ja tālrunim ir ieslēgta skaņa
- Pārbaudiet tālruņa iestatījumus, jo pretējā gadījumā varat nepamanīt trauksmes signālu


4.1. Zema un augsta līmeņa trauksmes signāli

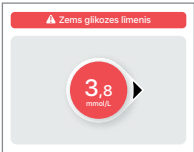Kas ir redzams	Ko tas nozīmē
	Zema glikozes līmeņa trauksme (zema līmeņa trauksme) Informē, ja Dexcom ONE sensora mērījums ir zem mērķa diapazona. • Iestatīšanas laikā ieslēdziet zema līmeņa trauksmi • Mainiet to, dodoties uz Iestatījumi > Trauksmes signāli • Varat izvēlēties trauksmes signāla līmeni un toni
	Augsta glikozes līmeņa trauksme (augsta līmeņa trauksme) Informē, ja Dexcom ONE sensora mērījums ir virs mērķa diapazona. • Iestatīšanas laikā ieslēdziet augsta līmeņa trauksmi • Mainiet to, dodoties uz Iestatījumi > Trauksmes signāli • Varat izvēlēties trauksmes signāla līmeni un toni

4.2. Trauksmes signālu ieslēgšana

Dexcom ONE piedāvā ieslēgt trauksmes signālus sistēmas iestatīšanas laikā. Vienkārši izpildiet ekrānā redzamās uzvednes. Ja pēc iestatīšanas vēlaties ieslēgt vai mainīt trauksmes signālus:

- Dodieties uz **Iestatījumi > Trauksmes signāli**
- Pieskarieties trauksmes signālam, ko vēlaties iestatīt
- Izpildiet ekrānā redzamās uzvednes

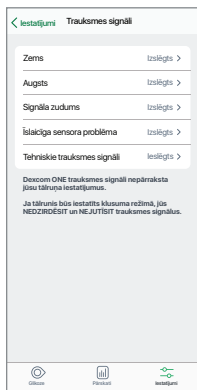

Varat arī ieslēgt vai personalizēt zema un augsta līmeņa trauksmes, pieskaroties ikonai **Vairāk** tendenču grafika augšējā labajā stūrī.

iOS	Android


Trauksmju iestatījumi

- **Dexcom ONE trauksmes signāli**
NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruna iestatījumus.
Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa ir izslēgta), jūs **NEDZIRDĒSIT** augsta vai zema glikozes līmeņa trauksmes signālus. Pārbaudiet tālruna iestatījumus, jo pretējā gadījumā varat nepamanīt trauksmes signālu.

- Trauksmes signāla vibrācijas ir tādas pašas kā paziņojumiem, ko saņemat no citām viedierīces lietotnēm. Lai uzzinātu, vai tas ir Dexcom ONE paziņojums, atliek vien apskatīt informāciju savā viedierīcē.

Trauksmes signālu skaņas personalizēšana

Varat izvēlēties trauksmes signālu toņus, kas jums vislabāk patīk. Lietotnes trauksmes signālu izvēlnē pieskarieties opcijai **Tonis**, lai attiecīgajam trauksmes signālam izvēlētos citu skaņu.

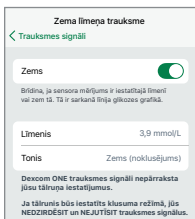

Izmantojiet trauksmes signālus, lai sasniegtu mērķus

Sadarbojieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai personalizētu savus trauksmes signālus, tādējādi palīdzot sev sasniegt izvirzītos mērķus. Piemēram, vai jūs uztrauc insulīna uzkrāšanās — devu uzņemšana ir pārāk bieža?

Lai izmantotu Dexcom ONE kā instrumentu, izvairoties no insulīna uzkrāšanās, veselības aprūpes speciālists var ieteikt ieslēgt snaudas funkciju augsta līmeņa trauksmes iestatījumā. Tādā veidā, saņemot augsta līmeņa trauksmi un to apstiprinot, pēc izvēlēta laika jūs tiksiet atkārtoti brīdināts. Trauksmes signāls atkārtosies, līdz Dexcom ONE mērījumi atkal būs jūsu mērķa diapazonā. Tas jums arī atgādinās vēlāk pārbaudīt mērījumus, lai pārlicinātos, ka glikozes vērtības ir pazeminājušās.

Tālāk redzamajā ekrānā ir redzama iespēja ik pēc 2 stundām aktivizēt trauksmes signāla snaudas funkciju. Ja jūsu Dexcom ONE mērījumi saglabāsies augsti 2 stundas pēc pirmās augsta līmeņa trauksmes, trauksmes signāls tiks atkārtots. Tas informē, ka, iespējams, jālieto vairāk insulīna. Ja paies 2 stundas un būsiet iekļāvies mērķa diapazonā, jūsu augsta līmeņa trauksme neatkārtosies.

Atcelt		Saglabāt	
Atlikt Kad esat apstiprinājis savu pirmo brīdinājumu, tas atkārtojas, ja augsts sensora mērījums saglabājas norādīto laika posmā. Atlasiet atkārtojuma laiku no 15 minūtēm līdz 4 stundām.			
2 stundas		00 minūtes	
1	05		
2	10		
3	15		

Ja jūsu insulīna līmenim ir tendence paaugstināties uzreiz pēc ēšanas, veselības aprūpes speciālists var ieteikt jums aizkavēt pirmo augsta līmeņa trauksmi, lai ļautu insulīnam iedarboties. Varat iestatīt **Atlikt 1. trauksmes signālu** un atlasīt aizkaves ilgumu **Augsta līmeņa trauksmes** iestatījumā.

5. nodaļa

Ārstēšanas metodes

Izmantojot Dexcom ONE, varat pieņemt lēmumu par ārstēšanas metodēm, neizmantojot glikozes līmeņa asinīs (AGL) mērītāju (mērītāju). Tomēr jums jāturpina izmantot mērītājs, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanas metodēm, līdz zināt, kā Dexcom ONE iedarbojas jūsu gadījumā. Nesteidzieties! Var paiet vairākas dienas, nedēļas vai mēneši, lai jūs iegūtu pārliecību par CGM izmantošanu, pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.

Dažreiz Dexcom ONE vietā ir jāizmanto mērītājs. Savukārt citreiz vislabāk ir tieši neārstēt, bet vienkārši novērot un gaidīt.

Pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm, sadarbojieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, pārskatot, kas jums ir vispiemērotākais.

5.1. Kad izmantot mērītāju Dexcom ONE vietā

Pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm, palaujieties uz savu AGL mērītāju, ja:

- Dexcom ONE trūkst skaitļa, bultiņas vai abu.

Piemēri: ja lietotnē redzat kādu no šīm pazīmēm, izmantojiet mērītāju.

Kas ir redzams	Ko tas nozīmē
	Nav skaitļa
	Nav bultiņas
	Nav skaitļa vai bultiņas

Attiecīgi — nav skaitļa, nav bultiņu, nav CGM ārstēšanas metodes.

- Jūsu Dexcom ONE mērījumi tagad atbilst jūsu simptomiem.

Piemērs: jūs nejūtaties labi, bet jūsu mērījumi liecina, ka iekļaujaties mērķa diapazonā. Rūpīgi nomazgājiet rokas un izmantojiet mērītāju. Ja mērītāja vērtība atbilst jūsu simptomiem, izmantojiet mērītāja vērtību, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanas metodi.



Attiecīgi — ja jums rodas šaubas, izmantojiet mērītāju.

5.2 Kad novērot un gaidīt

Ir reizes, kad nav nepieciešama ārstēšana, bet vienkārši novērošana un gaidīšana.



Insulīna uzkrāšanās: neveiciniet insulīna uzkrāšanos, lietojot devas pārāk bieži. Uzgaidiet vismaz 2 stundas starp devām, lai nejauši nepadarītu glikozes līmeni pārāk zemu. Dažreiz vislabāk ir vienkārši novērot un gaidīt.

5.3 Kā izmantot tendenču bultiņas

Tendenču bultiņas palīdz jums izlemt par nepieciešamo devas daudzumu.



Augšupvērstā bultiņa:
lietojiet nedaudz vairāk insulīna



Lejupvērstā bultiņa:
lietojiet nedaudz mazāk insulīna


5.4. Lēmumu par ārstēšanas metodēm pieņemšanas prakse

Izmantojiet tālāk sniegtos piemērus, lai praktizētu lēmumu pieņemšanu par ārstēšanas metodēm.

Apspriediet tos ar savu veselības aprūpes speciālistu un pārskatiet:

- Kad ir jāizmanto mērītājs
- Kā var izmantot Dexcom ONE
- Kad labāk novērot un gaidīt, nevis ārstēt

Situācija	Risinājums
Agri no rīta Jūsu zema līmeņa trauksme jūs pamodina. Jūs redzat: 	Apdomājiet... • Skaitlis un bultiņa: jums ir abi. • Skaitlis: jūsu glikozes līmenis ir zems — 4,4 mmol/L. • Bultiņa, rādītājs lēni samazinās: glikoze 30 minūtēs samazinās līdz 3,4 mmol/L. Kā rīkoties • Izmantojiet Dexcom ONE ārstēšanai kā parasti.
Brokastu laiks Pēc deviņdesmit minūtēm jūs apsēžaties brokastot. Jūs redzat: 	Apdomājiet... • Skaitlis un bultiņa: jums ir abi. • Augšupvērstā bultiņa: glikozes līmenis 30 minūtēs palielinās līdz 5 mmol/L. Kā rīkoties • Izmantojiet Dexcom ONE ārstēšanai. Lietojiet parasto devu un augšupvērstās bultiņas dēļ — nedaudz vairāk.

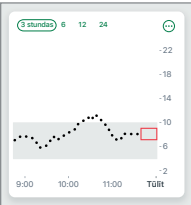Situācija	Risinājums
Pēc brokastīm Trīsdesmit minūtes pēc dozēšanas, lai iekļautu brokastis, parādās augsta līmeņa trauksme. Jūs redzat: 	Apdomājiet... - Insulīns: jūs lietojāt insulīnu mazāk nekā pirms stundas. Tam ir nepieciešams laiks, lai iedarbotos. Kā rīkoties - Nav nekas jādara. Novērojiet un gaidiet, lai izvairītos no insulīna uzkrāšanās. Neveiciet nekādu ārstēšanu vēl vismaz pusotru stundu.
Stundu vēlāk Jūs novērojāt un gaidījāt. Jūs redzat: 	Apdomājiet... - Insulīns: insulīns, ko uzņēmat brokastu laikā, nodrošina iekļaušanos mērķa diapazonā. Kā rīkoties - Nav nekas jādara. Ārstēšana nav nepieciešama.
Rīta vidusposms Jūs gatavojaties uzkodām rīta vidusposmā. Jūs redzat: 	Apdomājiet... - Bez skaitļa un bez bultiņas: jums nav neviena no tiem. Jūs pamanāt Dexcom ONE mērījumu intervālu. - Kļūmes ziņojums: jūs nesaņemat Dexcom ONE mērījumus. Kā rīkoties - Izmantojiet mērītāju, pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.

Situācija	Risinājums
Pusdienlaiks Pēc trim stundām jūs gatavojaties pusdienu devai. Jūs redzat: 	Apdomājiet... • Skaitlis un bultiņa: jums ir abi. • Lejupvērstā bultiņa: glikozes līmenis 30 minūtēs samazinās līdz 5 mmol/L. Kā rīkoties • Izmantojiet Dexcom ONE ārstēšanai. Lejupvērstās bultiņas dēļ nedaudz samaziniet devu.
Pēcpusdienas vidus Pēc pusdienām ir pagājušas 3 stundas. Jūs redzat: 	Apdomājiet... • Ir skaitlis, bet nav bultiņas: jums nav bultiņas. Kā rīkoties • Izmantojiet mērītāju, pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.
Agrs vakars Tieši pirms vakariņām jūtaties nedaudz nestabils un nosvīdis. Jūs redzat: 	Apdomājiet... • Simptomi un Dexcom ONE mērījums: jūsu simptomi neatbilst Dexcom ONE sensora mērījumiem. Kā rīkoties • Rūpīgi nomazgājiet rokas un veiciet dūrienu pirkstā. Ja mērītāja vērtība atbilst jūsu simptomiem, izmantojiet to lēmuma pieņemšanai par ārstēšanas metodēm.

6. nodaļa

Sensora sesijas beigšana

Katra sensora sesija ilgst 10 dienas.

Iestatījumi rāda, kad beidzas aktuālā sesija. Dexcom ONE brīdina, kad sesijai ir atlikušas 24 stundas, pēc tam 6 stundas, 2 stundas un visbeidzot — 30 minūtes.

Šajā periodā sesiju varat pārtraukt jebkurā laikā vai gaidīt galīgo trauksmes signālu, kas paziņos, ka sesija ir beigusies.

Vai vēlaties beigt sesiju agrāk? Skatiet **A pielikumu “Traucējummeklēšana”**.




Atcerieties, ka pēc sensora sesijas beigām nesaņemsit sensora mērījumus. Lai atsāktu sensora mērījumu saņemšanu, veiciet tālāk norādītās darbības, lai izņemtu veco sensoru, pēc tam ievadiet jauno sensoru un pabeidziet sensora uzsildīšanu.

6.1. Sensora noņemšana

Veiciet šīs darbības, lai:

- noņemtu sensoru no ķermeņa;
- izņemtu raidītāju no turētāja.

1	Dexcom ONE paziņo, kad jānomaina sensors.  Beidzies sensora termiņš  Nav trauksmes signālu Nomainīt sensoru tagad Nav mērījumu vai trauksmes signālu, kamēr nav ieslēgts jauns sensors. LABI Sensora noņemšanas instrukcijas
---	---

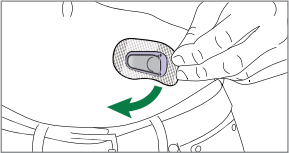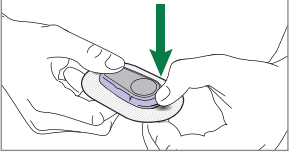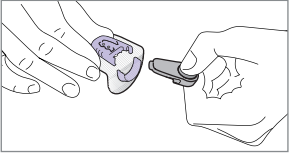2	Atlīmējiet plāksteri no malas. Noņemiet sensoru, raidītāja turētāju un raidītāju. 
3	Nolauziet purpursarkano raidītāja turētāju pie ierobiem. 
4	Izbīdiet raidītāju. Saglabājiēt raidītāju lietošanai ar nākamo sensoru. Izmetiet līpošo spilventiņu, ievērojot vietējās vadlīnijas par to komponentu iznīcināšanu, kas nonākuši saskarē ar asinīm. 

6.2. Atkārtoti izmantojiet savu raidītāju

Jūsu raidītājs darbojas 3 mēnešus. Izmantojiet to atkārtoti vairākām sensora sesijām. Dexcom ONE paziņo, kad raidītājs ir jānomaina, sākot no 3 nedēļām pirms attiecīgā termiņa. Ja tas ir jūsu vienīgais raidītājs, apmeklējiet vietni **dexcom.com** vai sazinieties ar vietējo Dexcom pārstāvi, lai pasūtītu citu.

Ja raidītājam ir atlicis mazāk nekā vienai sensora sesijai paredzēts akumulatora darbības laiks, to nevar izmantot, lai sāktu jaunu sensora sesiju. Skatiet **A pielikumu “Traucējummeklēšana”**.

Lapa ir atstāta tukša ar nolūku

PIELIKUMS

Traucējummeklēšana

Dexcom Clarity

Rūpes par Dexcom ONE

Iepakojuma simboli

Garantija

Tehniskā informācija

Norādījumi profesionālai lietošanai

Vārdnīca

Traucējummeklēšana

Šajā pielikumā ir sniegti īsi norādījumi par visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Tie ir uzskaitīti tālāk norādītajā secībā.

A.1. Precizitāte — sensora mērījumi nesakrīt ar asins glikozes līmeņa mērītāja vērtību

A.2. Precizitāte — sensora mērījumi nesakrīt ar simptomiem

A.3. Līpošs spilventiņš

A.4. Lietotne izslēdzas

A.5. Nevar dzirdēt trauksmes signālus

A.6. Vispārīgi trauksmes signāli

- Īslaicīga sensora problēma
- Neveiksmīga sapārošana
- Signāla zuduma trauksme
- Zems raidītāja akumulatora līmenis un pēdējās sesijas trauksmes
- Raidītāja kļūme

A.7. Sensora sesijas priekšlaicīga beigšana

A.8. Grafika intervāls

A.9. Tehniskā atbalsta dienests

A.10. Ūdens un Dexcom ONE

Visu informāciju par traucējummeklēšanu skatiet Dexcom tīmekļa vietnes (**dexcom.com**) sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.

A.1. Precizitāte — sensora mērījumi nesakrīt ar asins glikozes līmeņa mērītāja vērtību

No dažādiem ķermeņa šķidrumiem tiek ģenerēti dažādi skaitļi:

- AGL mērītājs mēra glikozes līmeni asinīs
- Dexcom ONE sensors mēra glikozes līmeni no intersticiāla šķidruma

A.2. Precizitāte — sensora mērījumi nesakrīt ar simptomiem


Ja mērījumi nesakrīt ar simptomiem:

- Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Nosusiniet tās. Pēc tam veiciet dūrienu pirkstā ar savu mērītāju. Ja mērītāja vērtība atbilst jūsu simptomiem, izmantojiet to lēmuma pieņemšanai par ārstēšanas metodēm.

A.3. Līpošs spilventiņš

Problēma

Aplikatoru nevar noņemt

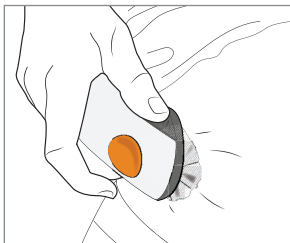


Risinājums



1. Uzmanīgi atdaliel līpošo spilventiņu ar piestiprinātu aplikatoru
2. Pārbaudiet ievades vietu, lai pārliecinātos, vai sensors nav atstāts ādā
3. Nelietojiet aplikatoru atkārtoti
4. Sazinieties ar Dexcom atbalsta komandu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi

Problēma


Līpošs spilventiņš, kas atlīmējas no ķermeņa

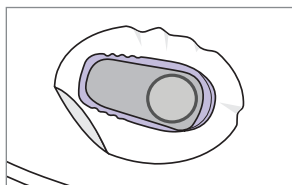


Risinājums

Pēc sensora ievadīšanas varat samazināt atlīmēšanās iespējamību:

- Uzliekot pārliedzamu plāksteri vai medicīnisko lentu (piemēram, Blenderm) virs līpošā spilventiņa. Nepārklājiēt raidītāju. Izvairieties no vaļējām brūcēm.
- Par pārliedzamā plāksterā pasūtīšanu sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi.

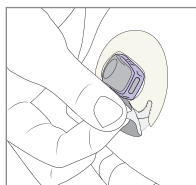

Pārliedzamais
plāksteris

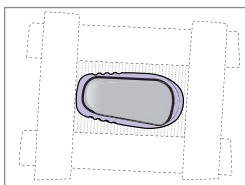

Medicīniskā
lenta

Nākamajā sensora sesijā pirms sensora ievadīšanas varat novērst atlīmēšanos:

- Pirms sensora ievadīšanas pārliedzinoties, vai āda ir tīra un sausa.
- Zem spilventiņa izmantojiet līpošus produktus (piemēram, Mastisol®, SkinTac™). Izvairieties no vietas, kur tiek ievietota adata.
- Rūpīgi paberzējiēt spilventiņu uz ādas.

Problēma

Ādas kairinājums ap sensora vietu

Risinājums

Daži cilvēki ir jutīgi pret sensora līmvielu. Ja līpošā spilventiņa atrašanās vietā ir radies ievērojams ādas kairinājums, piemēram, nieze, dedzinoša sajūta un/vai izsitumi, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

A.4. Lietotne izslēdzas

Ja lietotne izslēdzas, iespējams, ir pilna viedierīces atmiņa vai krātuve. Lai to novērstu, regulāri aizveriet atvērtās lietotnes, kas netiek izmantotas, un izdzēsiet neizmantotos failus.


A.5. Nav dzirdami trauksmes signāli

1. Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien tās neieslēdzat. Ja iestatīšanas laikā neieslēdzāt trauksmes signālus, dodieties uz **lestatījumi > Trauksmes signāli**, lai tos tūlīt ieslēgtu.
2. **Dexcom ONE trauksmes signāli**
NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruņa iestatījumus. Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa ir izslēgta) vai vibrācijai, jūs **NEDZIRDĒSIT** augsta vai zema glikozes līmeņa trauksmes signālus.
3. Ja trauksmes signāli ir ieslēgti un ierīcei ir ieslēgta skaņa, pārbaudiet, vai ir ieslēgta lietotne, *Bluetooth*, paziņojumi un skaļums noregulēts pietiekamā līmenī.
4. **2. nodaļā** skatiet viedierīces ieteicamo iestatījumu norādījumus. Viedierīces produkta instrukcijās skatiet informāciju par skaļruņa pārbaudīšanu.

A.6. Vispārīgi trauksmes signāli

Problēma

Īslaicīga sensora problēma

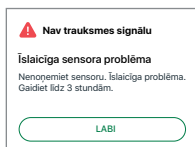

Sensors īslaicīgi nespēj izmērīt glikozes līmeni.

Risinājums

1. Pārbaudiet raidītāju — vai tas ir fiksēts raidītāja turētājā?
2. Uzgaidiet līdz 3 stundām, kamēr Dexcom ONE veic pašremontu.
3. Ja pēc 3 stundām ierīce nav salabota, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi.

Līdz ierīces salabošanai nav trauksmes signālu vai sensora mērījumu. Izmantojiet mērītāju, pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.

Pieskarieties **Labi**, lai notīrītu trauksmes signālu, un pēc tam sākuma ekrānā pieskarieties pie **Palīdzība**, lai iegūtu papildinformāciju.

Problēma

Neveiksmīga sapārošana

Neveiksmīga sapārošana Pabeigts
Neveiksmīga sapārošana
Vēlreiz mēģiniet sapārot

Dexcom ONE netika sapārota.

Risinājums

1. Pārliedzinieties, vai raidītājs ir fiksēts raidītāja turētājā.
2. Pārbaudiet raidītāja sērijas numuru (SN) un mēģiniet vēlreiz.
3. Ja sapārošanas laikā neveicāt tālāk minētās darbības, sapārojiet vēlreiz, šoreiz veicot minētās darbības.
 - Pieņemiet *Bluetooth* sapārošanas pieprasījumu
 - Uzturieties 6 metru rādiusā no displeja ierīces
4. Neizmantojiet raidītāju, kam beidzies derīguma termiņš.
5. Nomainiet sensoru, vēlreiz pievienojiet raidītāju un sapārojiet. Ja nepieciešama nomaīņa, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi.

Līdz ierīces salabošanai nav trauksmes signālu vai sensora mērījumu. Izmantojiet mērītāju, pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.

Problēma

Signāla zudums



Nav trauksmes signālu

Signāla zudums

Vienmēr turiet tālruni 6 metru attālumā no raidītāja. Uzgaidiet līdz 30 minūtēm.

LABI

Displeja ierīce un raidītājs nespēj sazināties.

Risinājums

Izmēģiniet katru no šiem padomiem un uzgaidiet 10 minūtes, lai redzētu, vai *Bluetooth* atkārtoti izveido savienojumu:

1. Pārlicinieties, vai raidītājs un displeja ierīce atrodas 6 metru rādiusā viens no otra.
Ja atrodaties ūdenī, turiet ierīci tuvāk par 6 metriem.
2. Izslēdziet un ieslēdziet *Bluetooth*.
3. Restartējiet displeja ierīci un atkārtoti atveriet lietotni Dexcom ONE.
4. Ja šie padomi problēmu neatrisina, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi.

Līdz ierīces salabošanai nav trauksmes signālu vai sensora mērījumu. Izmantojiet mērītāju, pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.

Problēma

Zems raidītāja akumulatora līmenis un pēdējās sesijas trauksmes

Zems raidītāja akumulatora līmenis

Jūsu raidītāja derīguma termiņš beigsies pēc aptuveni 3 nedēļām.

Neaizstājiet pašreizējo raidītāju ar jaunu. Gaidiet, līdz sistēma liek jums to nomainīt.

Pasūtiet jaunu raidītāju, ja tas vēl nav izdarīts.

LABI

Beidzies raidītāja akumulatora derīguma termiņš.

Risinājums


Pasūtiet jaunu raidītāju.

Ja drīz beigsies raidītāja akumulatora derīguma termiņš, Dexcom ONE informē, kad:

- Atlikušas 3 nedēļas
- Atlikušas 2 nedēļas
- Atlikusi vēl 1 sesija
- Līmenis ir pārāk zems vēl vienai sesijai
- Līmenis ir kritiski zems, un akumulators ir nekavējoties jānomaina

Problēma

Raidītāja kļūme

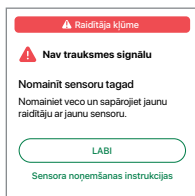

Raidītājs nedarbojas. Sensora sesija tiek automātiski apturēta.

Risinājums

Lai ziņotu par šo problēmu un saņemtu aizstājēju, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi. Līdz nomainītai nav trauksmes signālu vai sensora mērījumu. Izmantojiet mērītāju, pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.

A.7. Sensora sesijas priekšlaicīga beigšana


Iespējams, vēlēsities sensora sesiju beigt agrāk. Pēc sensora sesijas pārtraukšanas to vairs nevar atsākt.

1	Pieskarieties pie Iestatījumi
2	Pieskarieties pie Apturēt sensora sesiju Noņemiet sensoru un raidītāju. Papildinformāciju skatiet 6. nodaļā.

A.8. Grafika intervāls

Ja nesaņemāt sensora mērījumus, grafika tendenču punktos pa labi var parādīties intervāls. Šajā piemērā var redzēt intervālu vietā, kur jābūt pašreizējam punktam.

Kad sensora mērījumi tiek atsākti, grafikā var attēlot līdz 3 stundām nokavētus sensora mērījumus.

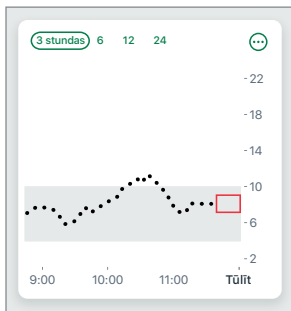

A.9. Tehniskā atbalsta dienests

Lai saņemtu palīdzību darbā ar Dexcom ONE CGM sistēmu, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi.

Par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar šo ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodaties.

A.10. Ūdens un Dexcom ONE

Kad raidītājs ir nofiksēts vietā, tas ir ūdensizturīgs. Peldieties, mazgājieties dušā vai vannā un neraizējieties par ūdeni un Dexcom ONE — vienkārši atstājiat displeja ierīci sausā vietā.

Ja atrodaties ūdenī, displeja ierīcei ir jābūt tuvāk par 6 metriem, lai iegūtu sensora mērījumus.

Dexcom Clarity

Dexcom Clarity programmatūra ir svarīga Dexcom CGM sistēmas sastāvdaļa.



Dexcom Clarity iezīmē jūsu glikozes līmenim raksturīgās iezīmes, tendences un statistiku. Koplietojiet Dexcom Clarity ar savu klīniku un uzraugiet uzlabojumus starp apmeklējumiem.

Lai izmantotu Dexcom Clarity, pierakstieties vietnē **clarity.dexcom.eu**. Izmantojiet savus pašreizējos Dexcom pieteikšanās datus vai izveidojiet kontu.

Dexcom Clarity var nebūt pieejama visos reģionos.

Rūpes par Dexcom ONE

C.1. Dexcom ONE apkope

Raidītājs

- Glabājiet kastē, līdz esat gatavs tā lietošanai. Pārbaudiet raidītāju un nelietojiet, ja tas ir bojāts.
- Glabājiet temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.

Pareiza devēja un sensora izmantošana

- Dexcom ONE komponenti nav saderīgi ne ar vienu no iepriekšējiem Dexcom produktiem. Nekombinējiet dažādu paaudžu raidītājus, uztvērējus un sensorus.

C.2. Glabāšana

Pareiza Dexcom ONE glabāšana palīdz novērst sistēmas kļūmes.

Sensors

- Glabājiet to sterilajā iepakojumā, līdz esat gatavs tā lietošanai.
- Glabājiet temperatūrā no 2 °C līdz 30 °C.

Raidītājs

- Kad nelietojat, glabājiet aizsargiekpakojumā.
- Glabājiet temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.
- Glabājiet vidē, kur relatīvais mitrums ir 10–95%.

C.3. Sistēmas iznīcināšana

Dažādos reģionos ir atšķirīgas prasības par elektronikas (raidītāja) un tās daļu iznīcināšanu, kas ir nonākušas saskarē ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem (sensors). Ievērojiet vietējās atkritumu apsaimniekošanas prasības.

D pielikums

Iepakojuma simboli

Simboli ir atrodami uz sensora un raidītāja iepakojuma. Tie norāda, kā pareizi un droši lietot Dexcom ONE. Simbolu aprakstus skatiet tālāk tabulā vai dodieties uz vietni **dexcom.com/symbols**.

Dažiem no šiem simboliem jūsu reģionā var nebūt izteiktas nozīmes, un tie ir norādīti tikai informatīvos nolūkos. Tālāk ir izskaidrota katra simbola nozīme.



Mainstrāva



Pilnvarotais pārstāvis
Eiropas Kopienā



Partijas numurs



Bluetooth ieslēgts; ierīces
sapārošana iespējota



Kataloga numurs



Uzmanību! Skatiet lietošanas
instrukciju



II klases aprīkojums



Skatiet lietošanas instrukciju



Ražošanas datums



Līdzstrāva



Nelietot atkārtoti!



Nelietot, ja iepakojums ir bojāts



Lietošanai tikai iekštelpās



Direktīva par elektrisko
un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) —
ievērojiet vietējās prasības
par pareizu iznīcināšanu



Mitruma ierobežojumi



Ievade

IP28

Aizsargierīču sniegtās
aizsardzības pret iekļuvi līmenis
priekšmetiem > 12,5 mm
diametrā; iegremdēšana ūdenī



Sargāt no karstuma



Turēt sausu



Ražotājs



CE atbilstības marķējums



MR (Magnētiskā rezonanse) nedrošs

PN

Daļas numurs



Sērijas numurs



Sterilizēts, izmantojot radiāciju



Temperatūras ierobežojums



BF tipa lietojamā daļa



Izlietot līdz (datums)

Riski un ieguvumi

Lietojot jebkuru medicīnas ierīci, pastāv riski un ieguvumi. Šajā pielikumā uzzināsi par tiem vairāk.

E.1. Riski

Dexcom ONE lietošanas riski:

- Netiek saņemti trauksmes signāli
- Dexcom ONE izmantošana, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanas metodēm, kad tas nav nepieciešams
- Sensora ievadīšanas problēmas
- Reakcija pret līmvielu
- Sensora vads paliek zem ādas

Netiek saņemti trauksmes signāli

Pārbaudiet displeja ierīci, ja nesaņemāt trauksmes signālus:

- Akumulators ir uzlādēts
- Lietotne ir ieslēgta
- Trauksmes signāli ir ieslēgti
- Skaļums ir noregulēts pietiekamā līmenī
- Skaļrunis un vibrācija darbojas
- Ierīce atrodas 6 metru diapazonā
- Nav sistēmas kļūmju, piemēram, īslaicīgas sensora problēmas vai signāla zuduma
- Uzsilšanas laikā un pēc sesijas beigām: Dexcom ONE 2 stundu uzsilšanas laikā vai pēc sensora sesijas beigām jūs **NESAŅEMSIT** trauksmes signālus un Dexcom ONE mērījumus.
- Lietotne *Bluetooth* ir ieslēgta

Pārliecinieties, vai viedtālruna iestatījumi atbilst Dexcom ieteiktajiem iestatījumiem.

Papildinformāciju skatiet **A pielikumā “Traucējummeklēšana”**, savukārt ieteicamos iestatījumus — **2. nodaļā**.

Dexcom ONE izmantošana lēmumu pieņemšanai par ārstēšanas metodēm

Dexcom ONE var izmantot lēmumu pieņemšanai par ārstēšanas metodēm gandrīz visās situācijās.

Situācija: jūsu pašsajūta neatbilst Dexcom ONE mērījumam

Ārstēšanas metodes rīks: veiciet dūrienu pirkstā, lai veiktu AGL mērījumu, un, ņemot vērā iegūto skaitli, pieņemiet lēmumu par ārstēšanas metodi

Situācija: CGM displejā nav Dexcom ONE mērījuma (skaitļa), bultiņas(-u) vai abu

Ārstēšanas metodes rīks: veiciet dūrienu pirkstā, lai veiktu AGL mērījumu, un, ņemot vērā iegūto skaitli, pieņemiet lēmumu par ārstēšanas metodi

Daži lietotāji ir konstatējuši ievērojamas precizitātes atšķirības dažādiem sensoriem. Ievadot katru sensoru, pievērsiet uzmanību tā precizitātei, pirms izlemjat to izmantot ārstēšanas metožu izvēlei.

Plašāku informāciju par ārstēšanas metožu lēmumu pieņemšanu, izmantojot Dexcom ONE, skatiet **5. nodaļā**.

Paracetamola/acetaminofēna traucējošo vielu riski

Izmantojot Dexcom ONE, varat lietot paracetamola/acetaminofēna standarta vai maksimālo 1 grama (1000 mg) devu ik pēc 6 stundām un joprojām izmantot Dexcom ONE mērījumus, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanas metodēm. Ja tiek lietota paracetamola/acetaminofēna deva, kas pārsniedz maksimālo devu (piemēram, > 1 grams ik pēc 6 stundām pieaugušajiem), tas var ietekmēt Dexcom ONE mērījumus un likt tiem izskatīties paaugstinātākiem, nekā tie ir patiesībā.

Hidroksiurīnvielas traucējošo vielu riski

Hidroksiurīnviela ir zāles, ko izmanto dažu vēža veidu vai asins slimību gadījumos, un tās var nepatiesi paaugstināt Dexcom ONE mērījumus, kas savukārt var izraisīt hipoglikēmijas trauksmes signālu nepamanīšanu vai kļūmes diabēta

uzraudzības lēmumos. Neprecizitātes līmenis ir atkarīgs no hidroksiurīnvielas daudzuma jūsu ķermenī. Izmantojiet savu mērītāju.

Sensora ievadīšanas riski

Sensora ievadīšana var izraisīt infekciju, asiņošanu vai sāpes. Daži cilvēki ir jutīgi pret sensora līmvielu. Ja līpošā spilventiņa vietā ir ievērojams ādas kairinājums, piemēram, nieze, dedzināšana un/vai izsitumi, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Klīniskajos pētījumos neviens sensora vads neatvienojās un neatdalījās; tomēr ir neliela iespēja, ka sensora vads var saplīst vai atvienoties un palikt zem ādas. Sterili saplīsuši vai atvienojušies sensora vadi parasti nerada ievērojamu medicīnisku risku. Ja sensora vads saplīst vai atvienojas, paliek zem ādas un tā rezultātā rodas infekcijas vai iekaisuma pazīmes, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu un tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi.

E.2. Ieguvumi

Daži Dexcom ONE izmantošanas ieguvumi:

- Diabēta uzraudzība
- Iespēja uzzināt glikozes līmeni un tā tendences
- Tūlītēja atgriezeniskā saite par dzīvesveida lēmumu pieņemšanu
- Lēmumu pieņemšana par ārstēšanas metodēm, izmantojot Dexcom ONE
- Mazinās sāpes un problēmas, ko izraisa biežas asins glikozes līmeņa pārbaudes, saudzējot pirkstu galus

Savu tendenču pārzināšana

Dexcom ONE ne tikai ik pēc 5 minūtēm nosūta glikozes rādījumus, bet arī sniedz pārskatus par glikozes tendencēm un iezīmēm. Tas ļauj redzēt kopainu un to, kā uzņemtajā pārtika, lietotās zāles un vingrinājumi ietekmē glikozes līmeni.

Lēmumu pieņemšana par ārstēšanas metodēm, izmantojot Dexcom ONE

Lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanas metodi, varat izmantot Dexcom ONE mērījumu un tendenču bultīņu. Papildinformāciju skatiet **5. nodaļā**. Nav jākalibrē dūrieni pirkstā. Tas mazina pārmērīgu duršanu pirkstā un tās radītās sāpes (Price and Walker, 2016), kā arī iespējamās kļūmes, ko izraisa neprecīza kalibrēšana (Wadwa, 2018).

Palīdzība diabēta uzraudzībā

Papildu trauksmes signālu funkcijas informē, ja glikozes līmenis pārsniedz mērķa diapazonu. Tas ļauj rīkoties, lai novērstu glikozes līmeņa pārmērīgu pazemināšanos vai paaugstināšanos. Papildinformāciju skatiet **4. nodaļā**.

Atsauces

Aleppo, G (2017). Replace-BG: a randomized trial comparing continuous glucose monitoring with and without routine blood glucose monitoring in well-controlled adults with type 1 diabetes. *Diabetes Care*, 40(4), 538-545. doi: 10.2337/dc16-2482.

Price D, Walker T. The Rationale for Continuous Glucose Monitoring-based Diabetes Treatment Decisions and Non-adjunctive Continuous Glucose Monitoring Use. *Eur Endocrinol*. 2016;12(1):24-30. doi:10.17925/EE.2016.12.01.24

Dexcom ONE garantija

Dažreiz notiek neparedzētas lietas. Dexcom rūpējas par jums!

Šajā pielikumā ir sniegta informācija par garantiju, norādot, par ko mēs rūpējamies un cik ilgu laiku.

F.1. Dexcom sensora ierobežotā garantija

Uz ko attiecas garantija un cik ilgs ir tās darbības laiks?

Ciktāl to atļauj likums, Dexcom ONE sensors tiek piegādāts “tāds, kāds tas ir”. Ar šo Dexcom atsakās no visām garantijām (tiešām, netiešām un ar likumu noteiktām) attiecībā uz sensoru, tostarp (bet ne tikai) netiešajām garantijām par piemērotību tirdzniecībai un noteiktam nolūkam. Nav garantiju, kas pārsniedz aprakstā minētās.

F.2. Dexcom raidītāja ierobežotā garantija

Uz ko attiecas garantija un cik ilgs ir tās darbības laiks?

Dexcom, Inc. (“Dexcom”) sākotnējam Pircējam (“jūs” vai “Pircējs”) nodrošina ierobežotu garantiju, ka Dexcom ONE raidītājam (“raidītājs”) normālas lietošanas apstākļos nav materiālu un izgatavošanas defektu (“ierobežotā garantija”) periodā, kas sākas datumā, kad tas tiek nosūtīts sākotnējam Pircējam, un beidzas trīs (3) mēnešus pēc tam.

Piezīme: ja saņēmāt šo raidītāju kā aizstājēju raidītājam, uz kuru attiecas garantija, ierobežotā garantija nomainītajam raidītājam paliek spēkā sākotnējā raidītāja atlikušo garantijas periodu, bet uz nomaiņu neattiecas nekādas citas garantijas.

Uz ko neattiecas garantija?

Šīs ierobežotās garantijas pamatā ir nosacījums, ka Pircējs pareizi un savlaicīgi izmanto nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības sistēmu saskaņā ar Dexcom nodrošināto dokumentāciju. Nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības sistēmu nav atļauts izmantot citos veidos. Nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības sistēmas ļaunprātīga izmantošana, nepareiza piekļuve tai vai tās apstrādājamajai un pārsūtītajai informācijai, nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības sistēmas vai mobilā tālruņa “uzlaušana” vai “sakņošana” un citu tamlīdzīgu neatļautu darbību veikšana, kas var apdraudēt jūs, izraisīt nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības sistēmas darbības traucējumus, nav atļauta un anulē jūsu ierobežoto garantiju.

Šī ierobežotā garantija neattiecas uz tālāk norādīto.

- Defekti vai bojājumi, kas radušies negadījuma, nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nolaidības, neparasta fiziska, elektriska vai elektromehāniska sprieguma, jebkuras produkta daļas pārveidošanas vai kosmētiska bojājuma rezultātā.
- Aprīkojums ar SN numuru ir noņemts vai padarīts nesalasāms.
- Visas virsmas un citas ārēji pakļautas daļas, kas normālas lietošanas rezultātā ir saskrāpētas vai bojātas.
- Traucējumi, kas rodas, izmantojot raidītāju kopā ar piederumiem, palīgpiederumiem un perifērām iekārtām (neatkarīgi no tā, vai tā ir aparatūra vai programmatūra), ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis uzņēmums Dexcom.
- Defekti vai bojājumi, ko izraisa nepareiza pārbaude, lietošana, apkope, uzstādīšana vai regulēšana.
- Tādu produktu vai pakalpojumu instalēšana, apkope un apkalpe, kas nav nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības sistēma (uz kuru var attiekties atsevišķa ierobežota garantija), neatkarīgi no tā, vai to nodrošina Dexcom vai kāda cita puse; tas ietver arī jūsu mobilo tālruni vai viedierīci un savienojumu ar internetu.

- Raidītājs, kas ir fiziski izjaukts vai kura jebkādi programmatūrai ir piekļūts bez atļaujas.
- Ūdens izraisīti bojājumi raidītājam.
- Dexcom ONE lietošanas instrukcijā norādīto specifikāciju pārsniegšana.

Dexcom saistības saskaņā ar Ierobežoto garantiju

Garantijas perioda laikā Dexcom bez maksas Pircējam nomainīs visus bojātos raidītājus. Lai saņemtu palīdzību par bojātu raidītāju, sazinieties ar Dexcom vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi.

Dexcom garantijas un atbildības saistību ierobežojumi

Iepriekš aprakstītā ierobežotā garantija ir ekskluzīva garantija raidītājam un aizstāj visas citas tiešās un netiešās garantijas faktiski vai arī saskaņā ar tiesību aktiem, normatīviem vai kā citādi.

Dexcom nepārprotami izslēdz visas citas tiešās vai netiešās garantijas un atsakās no tām, tostarp bez ierobežojuma jebkādas garantijas par piemērotību tirdzniecībai un noteiktam nolūkam vai tiesību nepārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad to aizliedz piemērojamie tiesību akti.

Dexcom neuzņemas atbildību ne par kādiem īpašiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem neatkarīgi no to cēloņa un par atbildības teoriju, kas jebkādā veidā izriet no jebkuras Dexcom ONE ierīces vai jebkuras Dexcom nodrošinātās funkcijas vai pakalpojuma pārdošanas, izmantošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nespējas to izmantot ar Dexcom ONE.

Šie ierobežojumi Dexcom garantijai un atbildības saistībām tiek piemēroti pat tad, ja Dexcom vai tā pārstāvim ir paziņots par šādiem kaitējumiem, neraugoties uz šīs ierobežotās garantijas būtiskā mērķa un Dexcom nodrošinātā ierobežotā tiesiskās aizsardzības līdzekļa neievērošanu.

Šī lerožotā ġarantija tiek nodrošināta tikai sākotnējam Pircējam, to nevar nodot nevienam citam, un tajā ir norādīts Pircēja ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis.

Ja kāda no šīs lerožotās ġarantijas daļām ir nelikumīga vai nav izpildāma kāda tiesību akta dēļ, šāda daļēja nelikumība vai izpildāmība neietekmē pārējās šīs lerožotās ġarantijas izpildāmību. Šī lerožotā ġarantija tiks piemērota likumā atļautajā maksimālajā apjomā.

G pielikums

Tehniskā informācija

G.1. Ierīces veikspējas raksturojumu kopsavilkums

Kad ZEMĀKS līmenis ir labāks

Pieaugušie	Veikspējas metrika*	Bērni
9,8%	Vispārējā precizitāte Vidējā MRA% (MRA), 2,22–22,22 mmol/L (% vidējā absolūtā kļūda salīdzinājumā ar atsaucis vērtību visos glikozes līmeņos)	7,7%
1. diena: 8,6% 2. diena: 8,7% 4.–5. diena: 10,7% 7. diena: 10,6% 10. diena: 10,6%	Precizitāte laika gaitā Vidējā MRA% (MRA), 2,22–22,22 mmol/L	1. diena: 10,5% 2. diena: 7,8% 4.–5. diena: 7,2% 7. diena: 6,2% 10. diena: 7,1%

Kad AUGSTĀKS līmenis ir labāks

Pieaugušie	Veikspējas metrika*	Bērni
92% [100%]	Klīniskā precizitāte % no mērījumiem, kas atradās Clarke kļūdu režģa (CEG) A zonā [% CEG A+B zona]	96% [99,8%]

*Atsauce: YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)

G.2. Produkta specifikācijas

BRĪDINĀJUMS: tādu piederumu izmantošana, ko nav norādījis vai piegādājis šī aprīkotāja ražotājs, var izraisīt šī aprīkojuma elektromagnētiskās emisijas pieaugumu vai samazināt elektromagnētisko imunitāti un izraisīt nepareizu darbību.

BRĪDINĀJUMS: pārnēsājams RF sakaru aprīkojums (tostarp perifērās ierīces, piemēram, antenas kabeli un ārējās antenas) ir jāizmanto ne tuvāk kā 30 cm attālumā no jebkuras Dexcom ONE CGM sistēmas daļas, tostarp ražotāja norādītajiem kabeļiem. Pretējā gadījumā var pasliktināties šī aprīkojuma veiktspēja.

Sensora produkta specifikācijas

Glikozes diapazons	2,2–22,2 mmol/L
Sensora lietderīgais kalpošanas laiks	Līdz 10 dienām
Glabāšanas un transportēšanas apstākļi	Temperatūra: 2–30 °C Glabāiet sensorus vēsā, sausā vietā
Sterilizācija	Sterilizēts, izmantojot radiāciju

Raidītāja produkta specifikācijas

Elektriskās drošības klase	Iekšējā barošana
Akumulatora ilgmūžība (parastā)	3 mēneši
Akumulatora uzlādes laiks	Neuzlādējams
Lietošanas apstākļi	Temperatūra: 10–42 °C Mitrums: 10–95% (relatīvais)
Glabāšanas un transportēšanas apstākļi	Temperatūra: 0–45 °C Mitrums: 10–95% (relatīvais)
Darbības augstums virs jūras līmeņa	No -396 metriem līdz 4206 metriem

Raidītāja produkta specifikācijas

Aizsardzība pret iekļūvi	IP28: aizsardzība pret lielu priekšmetu ievietošanu un iegremdēšanu ūdenī līdz 2,4 metriem uz 24 stundām
Aizsardzība pret elektrošoku	BF tipa lietojamā daļa
TX/RX frekvences	2,402–2,480 GHz
Joslas platums	1,07 MHz
Maksimālā izejas jauda	1,0 mW EIRP
Modulācija	Gausa frekvenču manipulācija
Datu pārraides ātrums	1 Mb/s
Datu sakaru diapazons	6 metri

Pakalpojuma kvalitātes kopsavilkums

Pakalpojuma kvalitāte Dexcom ONE sistēmas bezvadu sakariem, izmantojot *Bluetooth* Low Energy, tiek nodrošināta netraucēti 6 metru diapazonā starp Dexcom ONE raidītāju un sapārotu displeja ierīci (ja tiem pa vidu nav nekādu šķēršļu) ar regulāriem 5 minūšu intervāliem. Ja ir zudis savienojums starp raidītāju un displeja ierīci, pēc atkārtotas savienošanas visas nokavētās paketes (līdz 3 stundām) no raidītāja tiek pārraidītas uz displeja ierīci. Dexcom ONE CGM sistēma ir paredzēta radiofrekvenču (RF) sakaru pieņemšanai tikai no atzītām un sapārotām displeja ierīcēm.

Drošības pasākumi

Dexcom ONE sistēma ir paredzēta datu pārraidīšanai starp raidītāju un paredzētajām displeja ierīcēm saskaņā ar nozares standarta BLE protokoliem. Tā nepieņem radiofrekvenču (RF) sakarus, izmantojot jebkuru citu protokolu, tostarp klasiskos *Bluetooth* sakaru protokolus.

Papildus drošībai, ko nodrošina BLE savienojums, sakarus starp Dexcom ONE raidītāju un Dexcom ONE mobilo lietojumprogrammu aizsargā papildu drošības līmeņi un drošības uzlabošanas pasākumi, izmantojot šifrētu un patentētu datu formātu. Šis formāts iekļauj dažādas metodes, lai pārbaudītu datu integritāti un atklātu iespējamus datu falsifikācijas gadījumus. Lai gan šis formāts ir patentēts, dažādās šī patentētā datu formāta daļās tiek izmantoti nozares standarta šifrēšanas protokoli (piemēram, RSA un AES).

Ja mobilā lietotne Dexcom ONE nav atspējota, tā regulāri sazinās ar Dexcom serveriem. Sakarus starp Dexcom ONE lietotnēm un Dexcom serveriem aizsargā vairāki mehānismi, kas paredzēti aizsardzībai pret datu bojājumiem. Tas iekļauj nozares standarta JWIT zīmju bāzes autentifikāciju un autorizāciju. Visi šādi sakari tiek realizēti tikai šifrētā datu ceļā, izmantojot nozares standarta SSL formātu.

Elektromagnētiskās imunitātes un emisiju deklarācija un vadlīnijas

Šis raidītājs ir paredzēts izmantošanai tālāk tabulā norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Raidītāja klientam vai lietotājam ir jānodrošina tā izmantošana šādā vidē.

Imunitātes tests Raidītāja atbilstības līmenis

Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV saskarē ± 15 kV gaisā
Magnētiskais lauks (50 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m
Izstaroto lauku traucējumi IEC 61000-4-3	10 V/m pie 80–2700 MHz (AM modulācija)
Izstarotie un vadītie lauki Izmantošana lidmašīnā	FAA RTCA/DO-160 G izdevuma 20. sadaļas T kategorija. Var izmantot lidmašīnā saskaņā ar lidmašīnas kapteiņa norādījumiem

Mājas veselības aprūpes vidē joprojām var rasties elektromagnētiski traucējumi, jo nevar garantēt kontroli pār EMS vidi. Traucējuma notikumu var atpazīt pēc sensora mērījumu intervāliem vai lielām nepareizībām. Iesakām jums mazināt šo ietekmi, veicot vienu no šiem pasākumiem:

- Ja jūsu simptomi neatbilst jūsu mērījumiem, izmantojiet AGL mērītāju, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanas metodēm. Ja mērījumi konsekventi neatbilst jūsu simptomiem vai AGL mērītāja vērtībām, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu par to, kā lietot Dexcom ONE diabēta uzraudzīšanā. Veselības aprūpes speciālists var palīdzēt izlemēt, kā vislabāk izmantot šo ierīci.
- Ja displeja ierīcē trūkst 20 minūtes sensora glikozes datu (4 mērījumi), tiek parādīta signāla zuduma kļūme. Lai to novērstu, skatiet **A pielikumu “Traucējummeklēšana”**.
- Ja displeja ierīce negaidīti parāda ielādes ekrānu un 3 minūšu laikā neparāda tendenču ekrānu, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē **dexcom.com** vai vietējo Dexcom pārstāvi. Papildinformāciju skatiet **A pielikumā “Traucējummeklēšana”**.

Elektromagnētisko emisiju specifikācijas

Imunitātes tests	Atbilstība
Radiofrekvenču emisijas CISPR 11	1. grupa, B klase
Radiofrekvenču emisijas Izmantošana lidmašīnā	Atbilst FAA RTCA/DO-160 G izdevuma 21. sadaļas M kategorijai, kas attiecas uz izmantošanu kabīnē.

G.3. Atbilstība radiosakaru noteikumiem

Ar šo Dexcom, Inc. paziņo, ka radioiekārtas veida Dexcom ONE sistēma atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē: **dexcom.com/doc**.

Norādījumi profesionālai lietošanai

H.1. Ievads

Dexcom ONE atbalsta lietošanu vairākiem pacientiem. Jūs tikai:

- sagatavojiet Dexcom ONE sistēmu pacientam;
- izskaidrojiet pacientam, kas ir Dexcom ONE un kā tā darbojas;
- iestatiet sistēmu kopā ar pacientu;
- apsekojiet pacientu, lai paustu ieskatus par viņa(s) glikozes tendencēm, iezīmēm un statistiku.

Tas jums abiem labāk palīdz diabēta uzraudzībā. Turpmākajās sadaļās ir aprakstīta katra darbība un sniegti resursi, kurus kopīgot ar pacientiem, vadot viņus cauri sensora sesijai.

H.2. Sagatavojiet Dexcom ONE pacientam

Jūsu pacientam būs nepieciešama saderīga viedierīce, lai saņemtu, attēlotu un saglabātu glikozes informāciju. Lai apstiprinātu, ka pacienta ierīce ir saderīga ar Dexcom ONE lietotni, dodieties uz **dexcom.com/compatibility**.

Pacientam viedierīce ir jānēsā, lai:

- iegūtu sensora mērījumus;
- skatītu glikozes datus;
- reģistrētu datus vēlākai analīzei.

Ja tiek ieslēgti papildu trauksmes signāli, pacienti saņem:

- trauksmes signālus par zemu un augstu glikozes līmeni;
- tehniskus trauksmes signālus, kas informē pacientus, ka viņi nesaņem sensora mērījumus. Tie iekļauj trauksmes signālus par apturētu lietotni un citus līdzīgus trauksmes signālus.

Papildinformāciju skatiet **clarity.dexcom.eu** (var nebūt pieejama visos reģionos).

Izpildiet norādes par raidītāja noslaucīšanu un dezinficēšanu starp pacientiem.

1


Notīriet raidītāju

a. Sagatavošanās

- Aizsardzība: valkājiet tīrus cimdus un aizsargbrilles
- Iemērkšanas šķīduma sagatavošana: ielejiet Clorox Healthcare® Bleach Germicidal Cleaner (Clorox) šķīdumu pietiekami dziļā traukā, lai iegremdētu raidītāju

b. Tīrīšana

- Skalošana un beršana: noskalojiet raidītāju aukstā krāna ūdenī, vienlaikus tīrot ar mīkstu saru suku, līdz visi redzami netīrumi ir noņemti
- Mērcēšana un beršana:
 - Ievietojiet raidītāju sagatavotajā iemērkšanas šķīdumā uz 3 minūtēm
 - Iegremdēšanas laikā noberziet nelīdzenās vietas (skatiet zaļās bultiņas) ar mīkstu saru suku vai iepriekš piesūcinātu balinātāja salveti

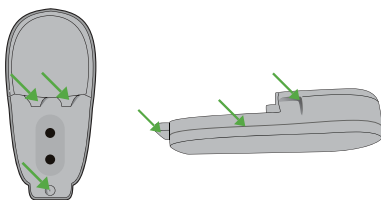

c. Skalošana un žāvēšana

- Skalošana: izņemiet iemērkto raidītāju un 10 sekundes skalojiet zem tekoša auksta krāna ūdens
- Žāvēšana: slaukiet raidītāju ar drānu, līdz tas ir pilnībā sauss

d. Pārbaudīšana

- Pārbaudiet, vai nav redzamu netīrumu. Ja ir, notīriet vēlreiz

Raidītāja dezinficēšana

a. Sagatavošanās

- Aizsardzība: valkājiet tīrus cimdus un aizsargbrilles
- Sagatavojiet iemērkšanas šķidrumu un šļirci:
 - Ielejiet CaviCide® (kavicīds) šķidrumu pietiekami dziļā traukā, lai iegremdētu raidītāju
 - Piepildiet šļirci ar apmēram 30 ml kavicīda

b. Dezinficēšana

- Skalošana:
 - Koncentrējieties uz nelīdzenajām vietām
 - Virpiniet kavicīdā 10 sekundes
 - Uzpildiet šļirci
- Beršana:
 - Piesūciniet tīru drānu vai salveti ar kavicīdu
 - Slaukiet visu raidītāju vismaz 3 minūtes vai līdz visu netīrumu noņemšanai
 - Koncentrējieties uz nelīdzenajām vietām
- Skalošana:
 - Koncentrējieties uz nelīdzenajām vietām
 - Virpiniet kavicīdā 10 sekundes
- Mērcēšana:
 - Ievietojiet raidītāju sagatavotajā iemērkšanas šķidrumā
 - Virpiniet 30 sekundes
 - Pēc tam atstājiet iemērkto vēl uz 3 minūtēm

c. Skalošana un žāvēšana

- Skalošana: izņemiet iemērkto raidītāju un 10 sekundes skalojiet zem tekoša auksta krāna ūdens
- Žāvēšana: slaukiet raidītāju ar drānu, līdz tas ir pilnībā sauss

H.3. Paskaidrojiet pacientam, kas ir Dexcom ONE un kā tas darbojas

Tālāk tabulā ir redzams, ko paskaidrot pacientiem, un norādīts, kur var atrast pacientiem nepieciešamo informāciju, lai uzlabotu viņu izpratni.


Paskaidrojiet	Parādiet
Kas ir CGM	Skatiet instrukcijas Sākt šeit sadaļu “Kā tas darbojas”
Dexcom ONE komponenti	Skatiet instrukcijas Sākt šeit sadaļu “Pārskats”

H.4. Iestatiet Dexcom ONE kopā ar pacientu

Sistēmas iestatīšana kopā ar pacientiem

Lai iestatītu lietotni, kopā ar pacientu izpildiet pamācības “Sākt šeit” iestatīšanas norādījumus.

Noteikti ievadiet sensora kodu, kas ir atrodams uz aplikatora līpošās pamatnes.

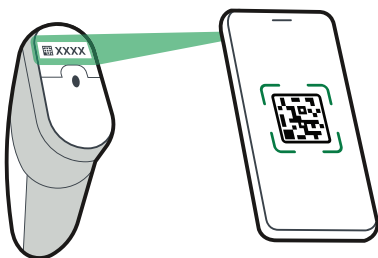

Iestatīšanas instrukcijās ir iekļauta informācija par sensora ievadīšanu un raidītāja piestiprināšanu.

Papildu iestatīšana kopā ar pacientiem

Iestatot Dexcom ONE kopā ar pacientu, jūs izveidosit personalizētu glikozes mērķa zonu, iestatot zema un augsta līmeņa trauksmes signālus, kas atbilst viņa(s) A1C.

Sensora 2 stundu uzsilšanas laikā izmantojiet nākamo tabulu, lai paskaidrotu, kā interpretēt ierīcē Dexcom ONE redzamo informāciju.

Paskaidrojiet	Parādiet
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu	3. nodaļa. Sākuma ekrāna pārskats šajā instrukcijā
Kas ir trauksmes signāli	4. nodaļa. Trauksmes signāli
Diabēta uzraudzība, izmantojot Dexcom ONE	5. nodaļa. Ārstēšanas metodes
Resursi	Iesakiet pacientam pārskatīt Dexcom vietni, lai pārlūkotu informāciju, ar kuru esat iepazīstinājies
Dexcom Clarity lietotne	Informējiet pacientus, kuri izmanto lietotni, par Dexcom Clarity tendencēm, statistiku un iezīmēm. Papildinformāciju skatiet šeit: clarity.dexcom.eu

H.5. Pacienta apsekošana

Pacienta glikozes datus jebkurā laikā varat skatīt viņa(s) sensora sesijas laikā vietnē **clarity.dexcom.eu**. Dexcom Clarity identificē tendences, iezīmes un uzrāda statistiku. Varat pārskatīt šo informāciju kopā ar pacientu, lai sniegtu ieskatu par to, kā labāk uzraudzīt diabētu.

Sesijas beigās noņemiet Dexcom ONE no pacienta. Papildinformāciju skatiet **6. nodaļā “Sensora sesijas beigšana”**.

H.6. Nākamās darbības

Pacients var vēlēties iegūt savu Dexcom ONE. Tas ir pieejams personīgai lietošanai. Lai sniegtu papildinformāciju, novirziet pacientu uz vietni **dexcom.com**.

Jūs atkal varat izmantot Dexcom ONE citam pacientam un iepazīstināt viņu ar Dexcom ONE priekšrocībām.

A1C	Asins analīze, ko izmanto, lai diagnosticētu 1. vai 2. tipa cukura diabētu un noteiktu, cik labi jūs pārvaldāt savu diabētu. A1C atspoguļo vidējo cukura līmeni asinīs pēdējo 2–3 mēnešu laikā.
Alternatīvas vietas pārbaude	Asins parauga izmantošana no citām (alternatīvām) vietām, izņemot pirksta galu, piemēram, plaukstu, apakšdelma vai augšdelma, lai iegūtu mērītāja vērtības.
Android	Operētājsistēma, ko izmanto viedierīcēs.
App Store vai Play Store	Interneta veikals lietojumprogrammu lejupielādei viedierīcē.
Apple viedpulkstenis	iPhone viedpulkstenis.
Asins glikozes līmeņa (AGL) mērītājs	Medicīnas ierīce, ko izmanto, lai izmērītu glikozes daudzumu asinīs.
Asins glikozes līmeņa (AGL) vērtība	Asins glikozes vērtība ir glikozes daudzums asinīs, ko mēra ar mērītāju.
<i>Bluetooth</i>	Tehnoloģija, kas ļauj ierīcēm sazināties savā starpā, neizmantojot vadu savienojumu.
Brīdinājums	Apraksta nopietnus un dzīvībai bīstamus apstākļus, sekas un to, kā izvairīties no apdraudējuma, lietojot Dexcom ONE.

Drošības paziņojums	Paziņojums par Dexcom ONE paredzētajiem lietojumiem un attiecīgajiem brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem un kontrindikācijām.
Hiperglikēmija	Augsts AGL. Tas pats, kas “augsts” vai augsts cukura līmenis asinīs. Hiperglikēmiju raksturo glikozes pārmērība asinīs. Ir svarīgi ārstēt hiperglikēmiju. Ja hiperglikēmija netiek ārstēta, tā var izraisīt nopietnas komplikācijas. Konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai noteiktu jums vispiemērotāko hiperglikēmijas iestatījumu.
Hipoglikēmija	Zems AGL. Tas pats, kas “zems” vai zems cukura līmenis asinīs. Hipoglikēmiju raksturo zems glikozes līmenis asinīs. Ir svarīgi ārstēt hipoglikēmiju. Ja hipoglikēmija netiek ārstēta, tā var izraisīt nopietnas komplikācijas. Konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai noteiktu jums vispiemērotāko hipoglikēmijas iestatījumu.
Indikācijas	Kā, kādiem mērķiem un kādos apstākļos būtu jālieto Dexcom ONE.
Insulīna krāšana	Insulīna devas uzņemšana drīz pēc pēdējās devas. Tā rezultātā var būt zems cukura līmenis asinīs. Neattiecas uz insulīna devu uzņemšanu, lai kompensētu tikko apēsto.
iOS	Operētājsistēma, ko izmanto Apple viedierīcēs.

IP	Starptautiskā elektrotehnikas komisija (IEC) ir bezpeļņas nevalstiska, starptautiska organizācija, kas izveidota, lai izstrādātu elektronikas drošības standartus. Viens no drošības standartiem ir Aizsardzības pret iekļuvi (IP) marķējums, kas klasificē un novērtē elektroniskās ierīces aizsardzību pret putekļiem, ūdeni, nejaušu saskari utt. IP vērtējumi ir skaitliski, un to skaits balstās uz apstākļiem, ar kuriem saskaras elektroniskā ierīce. IP22 nomināls informē, ka elektroniskajā ierīcē nevarēs ievietot pirkstus, kā arī tā netiks sabojāta vai nebūs nedroša, veicot īpašu pārbaudi ar pilošu ūdeni no augšas.
Kontrindikācija	Situācija, kad Dexcom ONE nevajadzētu lietot, jo tas jums var kaitēt. Lietošanas risks atsver ieguvumu.
Lidmašīnas režīms	Viedierīces iestatījums, kurā noteiktas funkcijas ir atspējotas, lai nodrošinātu atbilstību lidsabiedrības noteikumiem.
Lietotne vai lietojum-programma	Viedierīcē vai mobilajā ierīcē instalēta programmatūra. Dexcom ONE lietotne ir displejs nepārtraukta glikozes līmeņa uzraudzībai.
mg/dL	Miligrami uz decilitru. Standarta mērvienība AGL mērījumiem Amerikas Savienotajās Valstīs.
mmol/L	Milimoli uz litru. Mērvienība AGL vērtībām.

Nepārtraukta glikozes līmeņa uzraudzība (NGU)	Zem ādas ievadīts sensors pārbauda glikozes līmeni intersticiālajā šķidrumā. Raidītājs nosūta mērījumus uz displeja ierīci.
Noklusējums	Ražotāja iepriekš iestatīta ierīces iestatījuma opcija.
Paziņojums	Lietotnes ziņojums, kas tiek parādīts viedierīces ekrānā. Atkarībā no viedierīces iestatījumiem paziņojums var ietvert arī skaņu vai vibrāciju.
Piesardzības pasākumi	Īpaša piesardzība, kas jāievēro jums vai jūsu veselības aprūpes speciālistam, lai droši un efektīvi lietotu Dexcom ONE.
Sensora mērījums	Glikozes koncentrācija, kas izmērīta intersticiālajā šķidrumā.
Sensora sesija	Periods pēc jauna sensora ievadīšanas. Šajā periodā ik pēc 5 minūtēm displeja ierīcē(s) tiek rādīts jūsu Dexcom ONE mērījums.
Uzlauzta vai modificēta	Ierobežojumu un drošības pasākumu, ko ražotājs ir iestatījis viedierīcē, noņemšana. Noņemšana izraisa drošības risku, un dati var kļūt neaizsargāti. Neinstalējiet Dexcom ONE lietotni uzlauztā vai modificētā viedierīcē. Tā var nedarboties pareizi.
Viedierīce vai mobilā ierīce	Elektroniska ierīce bez vada, mobila un savienota ar internetu, piemēram, viedtālrunis vai planšetdators.
Vienlaicīga balss un datu pārraide	Iespēja vienlaikus veikt tālruņa zvanu un piekļūt internetam, izmantojot to pašu mobilo savienojumu.

Alfabētiskais satura rādītājs

Apkope, 45

Ārstēšanas metodes, 25, 27

Dexcom Clarity, 44

Drošības paziņojums, 5

Garantija, 53

Grafiks

 Mērījums, 16

 Nav mērījumu, 43

Iestatīšana, 3

Īslaicīga sensora problēma, 38

Kļūmes ziņojums, 18, 38

Līpošs spilventiņš, 35

Mērījumi neatbilst AGL mērītāja vērtībai, 34

Mērījumi nesakrīt ar simptomiem, 35

Mērītāja izmantošana Dexcom ONE vietā, 25

Mērķi, 23

Nav dzirdami trauksmes signāli, 37

Novērošana un gaidīšana, 26

Precizitāte

 Dexcom ONE mērījumi nesakrīt ar
 asins glikozes līmeņa mērītāja vērtību, 34

 Dexcom ONE mērījumi nesakrīt
 ar simptomiem, 35

Profesionāla lietošana, 62

Raidītāja trauksme, 42

Resursi, 3, 34

Sākuma ekrāns, 15

Sensora sesija

 Priekšlaicīga beigšana, 42

Sensora sesijas beigšana, 30

Sensora sesijas priekšlaicīga beigšana, 42

Signāla zuduma trauksme, 40

Simboli, 46

Tehniskā informācija, 57

Tendenču bultiņa, 15, 16, 17, 26

Traucējummeklēšana, 34

Trauksmes signāli, 20

 Ieslēgšana, 22

 Īslaicīga sensora problēma, 38

 Raidītāja trauksmes, 41, 42

 Signāla zudums, 40

 Vispārīgi, 38

Trauksmes signāli NETIEK ATSKAŅOTI, ja displeja ierīcei ir izslēgta skaņa/ieslēgts klusums, 22

Ūdens un Dexcom ONE, 43

Vārdnīca, 67

Zema raidītāja akumulatora līmeņa trauksmes signāls, 41



© 2021 Dexcom, Inc. Visas tiesības paturētas.

Attiecināmie patenti: **dexcom.com/patents**

Dexcom, Dexcom ONE, Dexcom Share, Share un Dexcom Clarity ir reģistrētas preču zīmes vai Dexcom, Inc. preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un, iespējams, citās valstīs. *Bluetooth* ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Apple ir Apple, Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Android ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Alphabet, Inc. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Dexcom



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200
dexcom.com

Ārpus ASV: sazinieties ar savu
vietējo Dexcom pārstāvi



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



AW00017-61 Rev 001 MT00017-61
Rev Date: 2021/03